

## Analyse coproscopique - 1 pièce

## **Avantages**

L'ilanalyse coproscopique est une source d'informations irremplaçable pour surveiller les parasites qui peuvent être présents dans l'iélevage et prendre la décision d'agir à bon escient.

Chez le cheval, l'analyse coproscopique permet d'établir le bilan parasitaire de l'équidé afin de raisonner l'utilisation de vermifuges. I4. Envoyer à température ambiante au laboratoire avec le document fourni bien complété et signé au laboratoire.

Vous recevez les résultats par courrier et par mail dans les 72 heures qui suivent l'envoi de l'échantillon.

## Caractéristiques

Le kit de prélèvement pour l'analyse coprologique comprend :

- le pot de prélèvement,
- la fiche de renseignement,
- l'enveloppe préaffranchie pour l'acheminement des prélèvements.

Référence : 10000017

Fiche mise à jour le vendredi 6 mars 2020 à 14h29

## Mode d'emploi

Mode dlemploi bovin:

- 1. Prélever les matières fécales fraîches (si possible directement dans le rectum de llanimal) et remplir le pot jusqu'là 1cm du bord supérieur.
- 2. Identifier le pot avec le numéro de llanimal tel qu'il est inscrit sur la feuille de demande d'analyses.
- 3. Disposer le pot fermé dans le sac étanche et sceller ce sac.
- 4. Envoyer à température ambiante au laboratoire avec le document fourni bien complété et signé au laboratoire.

Mode dlemploi cheval:

II. Prélever un échantillon de crottin frais (si possible à la sortie du rectum. Idéalement, l'échantillon ne doit pas avoir été en contact avec le sol ou la litière). Remplir le pot jusqu'llà 1cm du bord supérieur.

II. Identifier le pot avec le numéro de llanimal tel qu'il est inscrit sur la feuille de demande d'analyses. II. Disposer le pot fer



VITAL COM

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

